

订货信息

产品系列	型号	主要内容物				装箱规格	
		透明敷料	医用消毒葡萄糖酸洗必泰棉棒	医用消毒碘伏棉棒	液体敷料 (3M™ Cavilon™ 3343)	单盒 个数	单箱 个数
3M™ Tegaderm™ 中心静脉置管护理套件—A+型护理套件							
	C1685-1					25	100
	C1688-1					25	100
3M™ Tegaderm™ 中心静脉置管护理套件—钻石型护理套件							
	C1679-1					25	100
	D1679-1					25	100
3M™ Tegaderm™ 中心静脉置管护理套件—加强型护理套件							
	C9546HP-8					25	100
	C9546HP-1					25	100
	D9546HP-1					25	100
	9546HP-2					25	100



3M中国有限公司

总办事处

上海市长宁区兴义路8号万都中心34F
电话:86-021-62753535

邮编:200051
传真:86-021-62752343



欢迎关注3M学院

欢迎访问:<https://www.3m.com.cn>
货号:XXXXXXXXXX

3M
Tegaderm™
IV Care Solutions



3M™ Tegaderm™
IV Kits
中心静脉置管护理套件




中心静脉置管维护集束化措施

- 每日评估导管留置必要性
- 手卫生
- 洗必泰酒精皮肤消毒
- 正确评估及更换敷料
- 酒精充分机械摩擦消毒导管接口
- 医护人员教育培训

腔内感染风险
导管接口部位细菌
沿导管内壁传播



腔外感染风险
皮肤表面细菌
经穿刺部位沿导管外壁传播

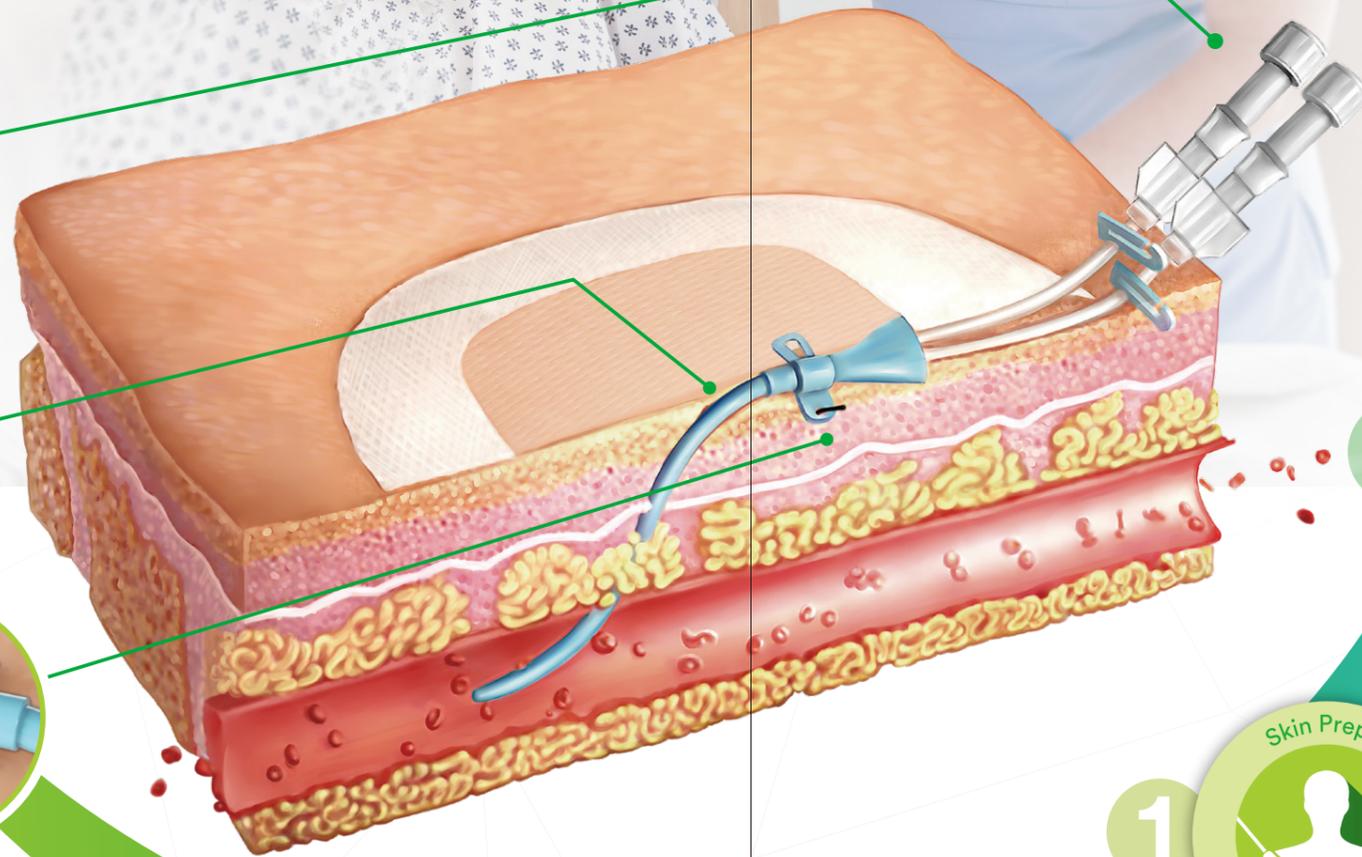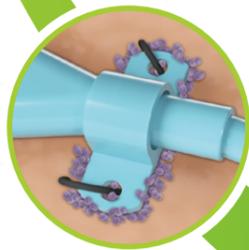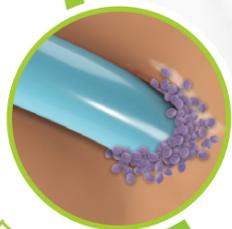

3M™ Tegaderm™ 中心静脉置管护理套件

- ✓ 提供统一、优化的护理流程
- ✓ 提高临床工作效率
- ✓ 增强集束化措施依从性
- ✓ 有助医院精准管理
- ✓ 降低患者感染风险



权威推荐

中华人民共和国卫生行业标准
WS/T 433-2013《静脉治疗护理技术操作规范》
PICC、CVC、PORT维护时, **宜使用专用护理包**

3M™ Tegaderm™ 钻石型中心静脉置管护理套件 C1679-1

科学医用粘胶技术的精准运用,得以兼顾安全、便捷与舒适的多重临床需求,为长期使用透明敷料的患者(如肿瘤患者)提供更周全地呵护。

上层薄膜敷料

高透气半渗透的聚氨酯薄膜
柔韧贴合导管与皮肤
抵御外界侵入

下层菱形涂胶层

全层菱形涂布的优化粘胶
可有效稳固导管
亦可温和轻松撕除



✓ 更安全

稳定持久固定导管
降低导管移位与
非计划性拔管风险

✓ 更便捷

优化医用粘胶
撕除与粘贴同样轻松
减少残胶烦恼

✓ 更舒适

柔韧的聚氨酯薄膜配合
全层的菱形医用粘胶涂布
共筑安心舒适无菌屏障

3M™ Tegaderm™ 钻石型中心静脉置管护理套件 C1679-1

PICC护理推荐流程

1 打开护理套件第一层



STEP 1
洗手



STEP 2
铺巾



STEP 3
移除旧敷料



STEP 4
快速手消毒



STEP 5
皮肤清洁
医用消毒酒精棉棒



STEP 6
皮肤消毒
医用消毒葡萄糖酸洗必泰棉棒



STEP 7
再次
快速手消毒



STEP 8
戴无菌手套

2 打开护理套件第二层



STEP 9
固定导管
透明敷料 & 皮肤伤口胶带



STEP 10
消毒导管接口
医用酒精棉片



STEP 11
再次洗手



STEP 12
记录


3M™ Tegaderm™ A+型中心静脉置管护理套件 C1688-1

PORT 护理推荐流程

1 打开护理套件第一层




2 打开护理套件第二层

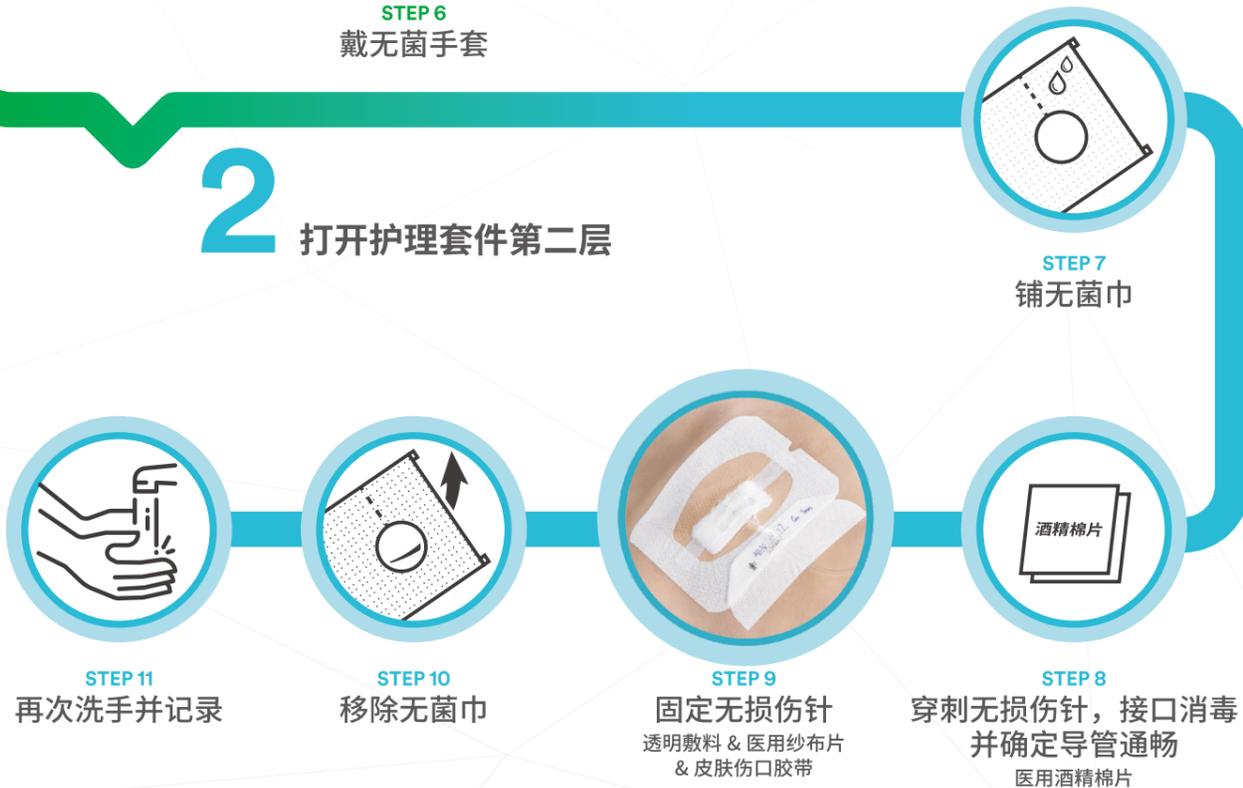

3M™ Tegaderm™ A+型中心静脉置管护理套件 C1688-1

升级版预切无菌巾，满足更多操作临床需求。

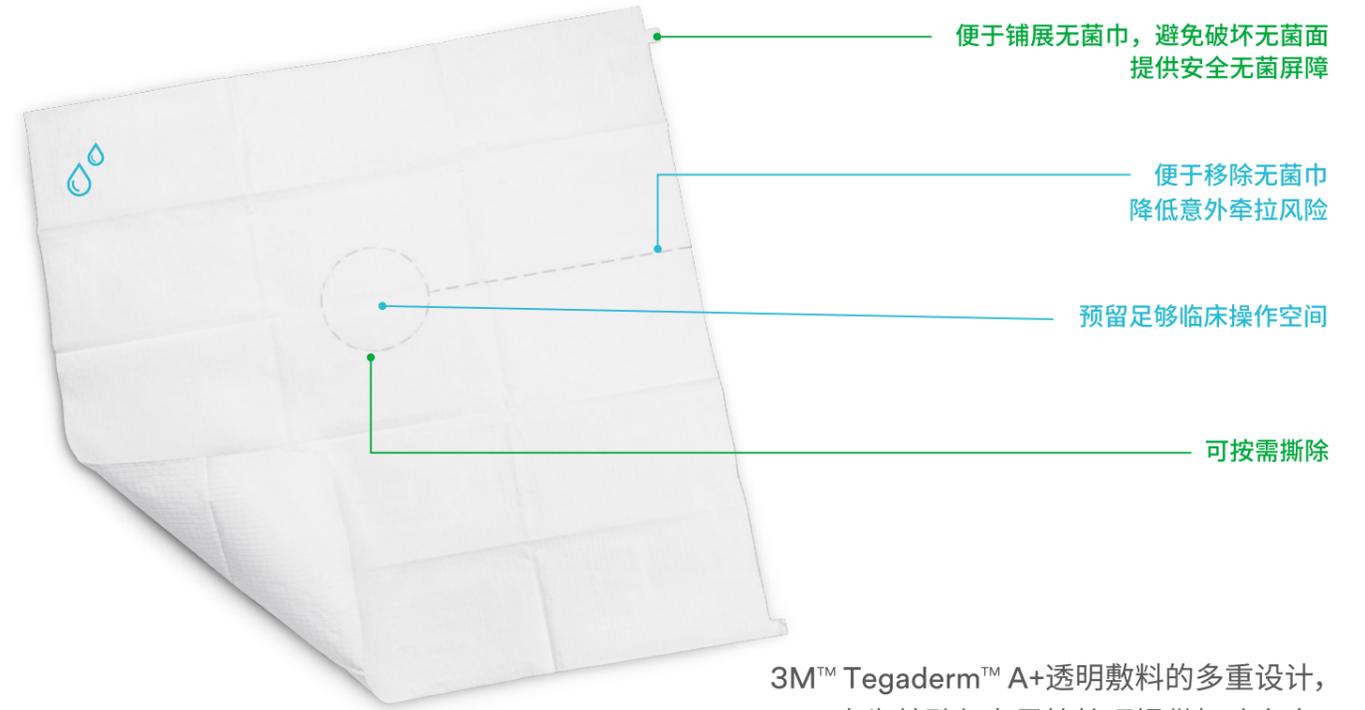

3M™ Tegaderm™ A+透明敷料的多重设计，
专为特殊复杂导管护理提供极致安全。

智能边框

微型预切的无纺布，更贴合顺应
有效减少卷边发生

柔韧屏障

高透气半渗透的聚氨酯薄膜
持续抵御外界细菌病毒侵入

控力孔槽

敷料与固定胶带联合
将导管牢牢锁住

加强宽型固定胶带

有效避免因意外牵拉
所致导管移位或滑脱

3M™ Tegaderm™ 加强型中心静脉置管护理套件 C9546HP-1

快速固定, 高效便捷

框型设计

方便握持, 易于将敷料中心对准穿刺部位

高透气性聚氨酯薄膜

有效抵御外界细菌、病毒, 保护穿刺部位

亲水性医用压敏胶

即使在湿热多汗环境下, 依然稳妥固定
提供持久粘附, 减少敷料更换频率

薄膜表面特殊离型处理

便于 3M 胶带在其表面粘附与撕除
而不破坏其完整性



3M™ Tegaderm™ A+型中心静脉置管护理套件 C1685-1

强效固定, 极致安全

智能边框

微型预切的无纺布, 更贴合顺应
有效减少卷边发生

控力孔槽再升级


预切型孔槽, 更轻松移除, 避免更换
敷料时对导管的意外牵拉

柔韧屏障

高透气半渗透的聚氨酯薄膜
持续抵御外界细菌病毒侵入

控力孔槽再升级

预切型孔槽, 可根据管径大小调节
更适用于多腔导管的固定

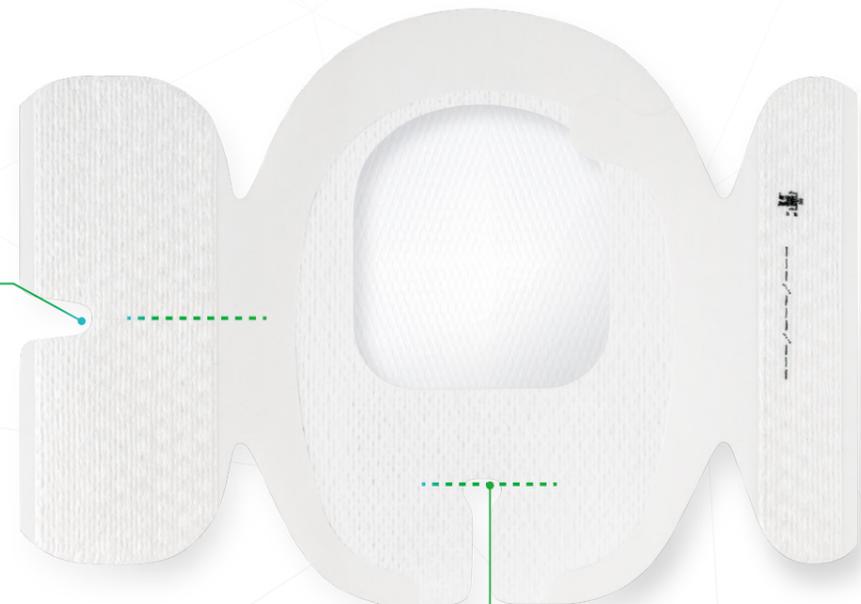

3M™ Tegaderm™ A+型中心静脉置管护理套件 C1685-1

CVC护理推荐流程

1 打开护理套件第一层



STEP 1
洗手



STEP 2
铺巾



STEP 3
移除旧敷料



STEP 4
快速手消毒




STEP 8
戴无菌手套



STEP 7
再次
快速手消毒



STEP 6
皮肤消毒
医用消毒葡萄糖酸洗必泰棉棒

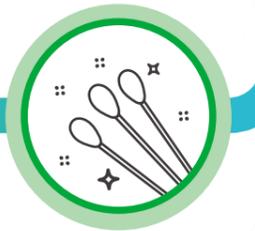

STEP 5
皮肤清洁
医用消毒酒精棉棒

2 打开护理套件第二层



STEP 12
记录



STEP 11
再次洗手



STEP 10
消毒导管接口
医用酒精棉片



STEP 9
固定导管
透明敷料 & 皮肤伤口胶带