



Filtek™

Z350XT Flowable 流动树脂

经典的流动树脂 轻松的注射方式


3M™ Filtek™ Z350XT Flowable流动树脂，现在有了新的注射器，符合人体工学的设计，使注射轻松、简单。

减少气泡，减少溢出

避免气泡的产生，停止推送后材料立刻停止溢出，操作易掌控。

显示余量

蓝色推杆的长度即为材料的余量。当材料用尽时，只有白色手柄在外。

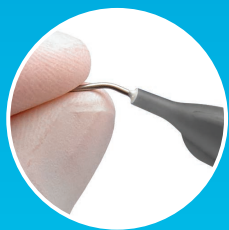

可弯曲的注射头

注射头可轻松弯曲，到达各个角落。

易于握持和注射

三角形的手柄，便于夹持，易于调整注射操作。



主要优势

- 避免气泡产生，避免材料溢出
- 可轻松弯曲注射头，到达各个角落
- 人体工学设计，易于握持和注射
- 良好的适合性、抛光保持性、耐磨性
- 适合各种适应证和技术

可加热后使用

加热最高至70°C，最长1小时，
重复最多25次。



临床病例

3M™ Filtek™ Z350XT Flowable流动树脂能够与天然牙平滑过渡，造就美观的修复体。



术前



流体树脂修复



术后

病例来自 Dr. Gunnar Reich, Munich, Germany

3M™ Filtek™ Z350XT Flowable流动树脂具有优良的适合性和边缘密合性。



术前



流体树脂修复



术后

病例来自 Dr. Giuseppe Chiodera, Brescia, Italy

适应证

(单次层厚不超过2mm)



III 类洞



V 类洞



微创修复¹



垫底



洞衬



间接修复体的
(小范围修补)



修补²



填倒凹



窝沟封闭

适应证详见说明书。

订货信息



3M™ Filtek™ Z350XT Flowable流体树脂，
包括：2g流体树脂×2支/包（不含分配头）

颜色	产品规格
A1	7032A1
A2	7032A2
A3	7032A3
A3.5	7032A3.5

型号	产品信息
3700T	3M™ Filtek™ Z350XT Flowable Restorative Dispensing Tips分配头 包括：20个分配头/包



3M

3M中国总办事处

上海市长宁区兴义路8号万都中心大厦38楼 邮编：200336

电话：86-21-62753535 传真：86-21-62752343

欢迎访问 www.3M.com.cn/dental